

車いす用可搬形スロープ

介護保険レンタル対象品


安心と使いやすさにスマートさをプラス

ケアスロープ®

最大耐荷重
300kg

◆ 今まで入らなかった狭い間口に対応できる豊富なラインナップ！

《日本製》特許第5549894号 取得

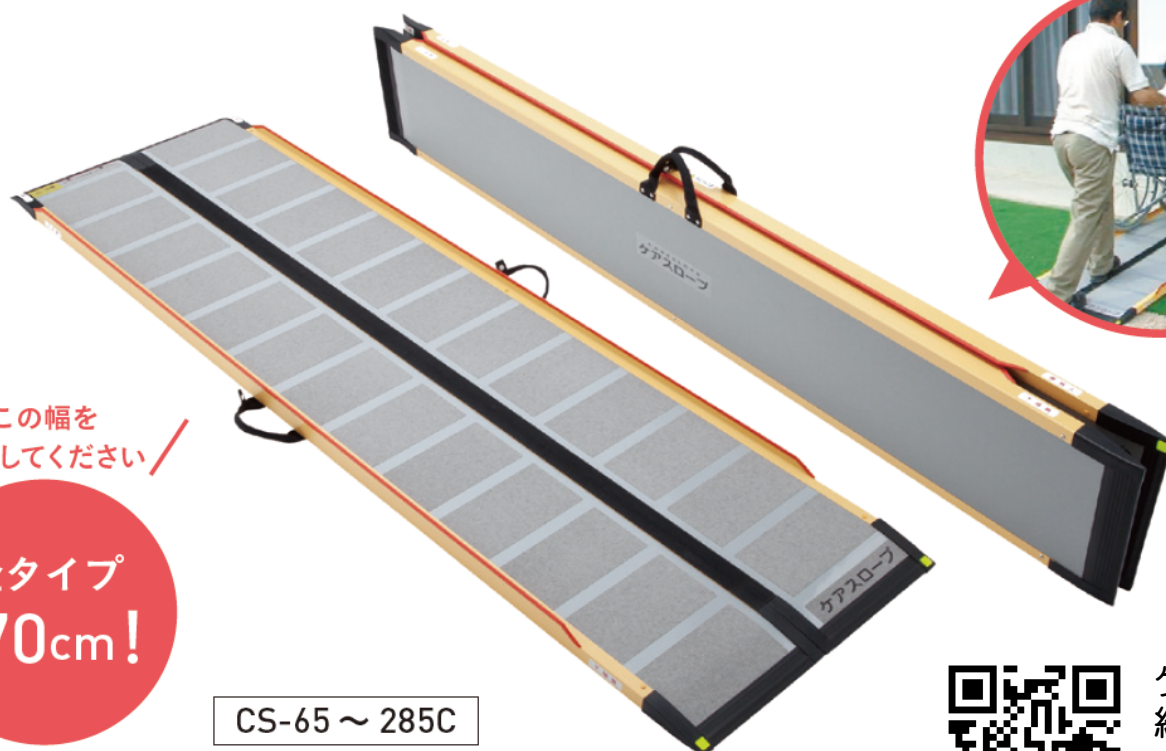

この幅を
活かしてください！

全タイプ
幅70cm！

CS-65 ~ 285C



ケアスロープ
紹介動画

YouTube

●狭い間口にも対応

幅を70cmとすることで、
従来入らなかった狭い間口
にも対応！



●最小回転で 乗り入れ可能

下端部の脱輪防止エッジ
をカットすることで車いすの
フットサポートがエッジに
当たることなく、最小回転
半径で乗り入れが可能です。



●夜間の視認性もUP

四隅に蛍光テープと反射テープ
を貼ることで視認性がアップ！
うす暗い場所や雨で濡れたア
スファルトと黒いゴム部分の
識別がつきにくい場面でも、
安全にご利用いただけます。



●屋内でも使えるスロープ

走行面に柔らかい材質のすべり止
めを採用。スロープの上を
裸足で歩いても痛くありません。

●折りたたみ・自立

全タイプ折りたたみ・自立
するので、無理な体勢からの
持上げ不要。



使用方法



1 上端側を設置場所に置いてください



2 取っ手のボタンを外してください



3 取っ手を持ち、パネルを広げてください



4 パネルの設置面を上端側に表示している「設置ライン」までかけてください

タイプ	折り畳み時の厚さ	エッジの高さ	長さ×幅	重さ	適応段差目安 ※傾斜5～15°	標準小売価格 (税別)
CS-65	8cm	2.5cm	65×70cm	約3kg	5～15cm	67,000円
CS-100	8cm	2.5cm	100×70cm	約5kg	8～24cm	83,000円
CS-120	8cm	2.5cm	120×70cm	約6kg	10～30cm	107,000円
CS-150	10cm	2.5cm	150×70cm	約8kg	13～37cm	118,000円
CS-175	10cm	2.5cm	175×70cm	約9kg	15～43cm	125,000円
CS-200	10cm	2.5cm	200×70cm	約10kg	17～50cm	136,000円
CS-240C	10cm	2.5cm	240×70cm	約12kg	20～60cm	230,000円
CS-285C	11cm	3.5cm	285×70cm	約15kg	24～73cm	290,000円


●素材：繊維強化プラスチック
アルミ

●全タイプJIS認証

※適応段差目安について

- ・傾斜5° (自力走行)
→ 介助者なしで使用
- ・傾斜15° (最大適応段差)
→ 通常に使用できる限界



組み合わせてもっと便利に！

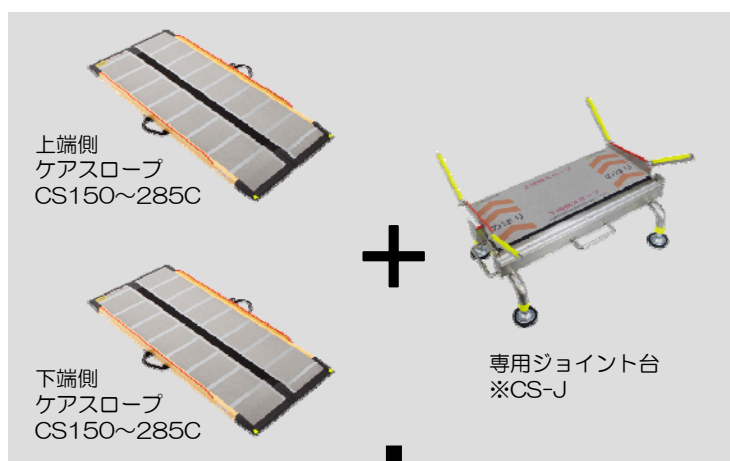

ケアスロープJ

連結式 長尺スロープ

組み合わせることで
より大きな段差にも
対応可能です。
様々な住宅環境にお
使いいただけます。

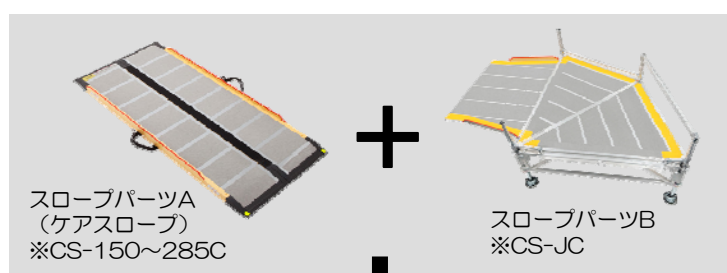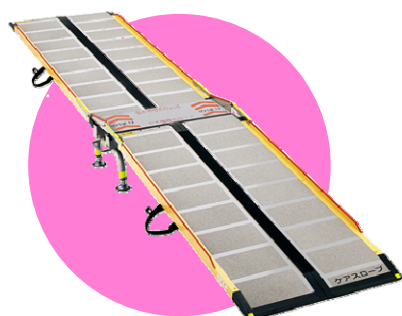

ケアスロープJC

横方向 乗り入れスロープ

掃き出し窓などから
の出入りが可能にな
ります。
左右どちらでも設置
可能です。



お問い合わせ



大栄株式会社